


## СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТУЛ PLANMECA OLO

### Руководство пользователя и руководство по установке

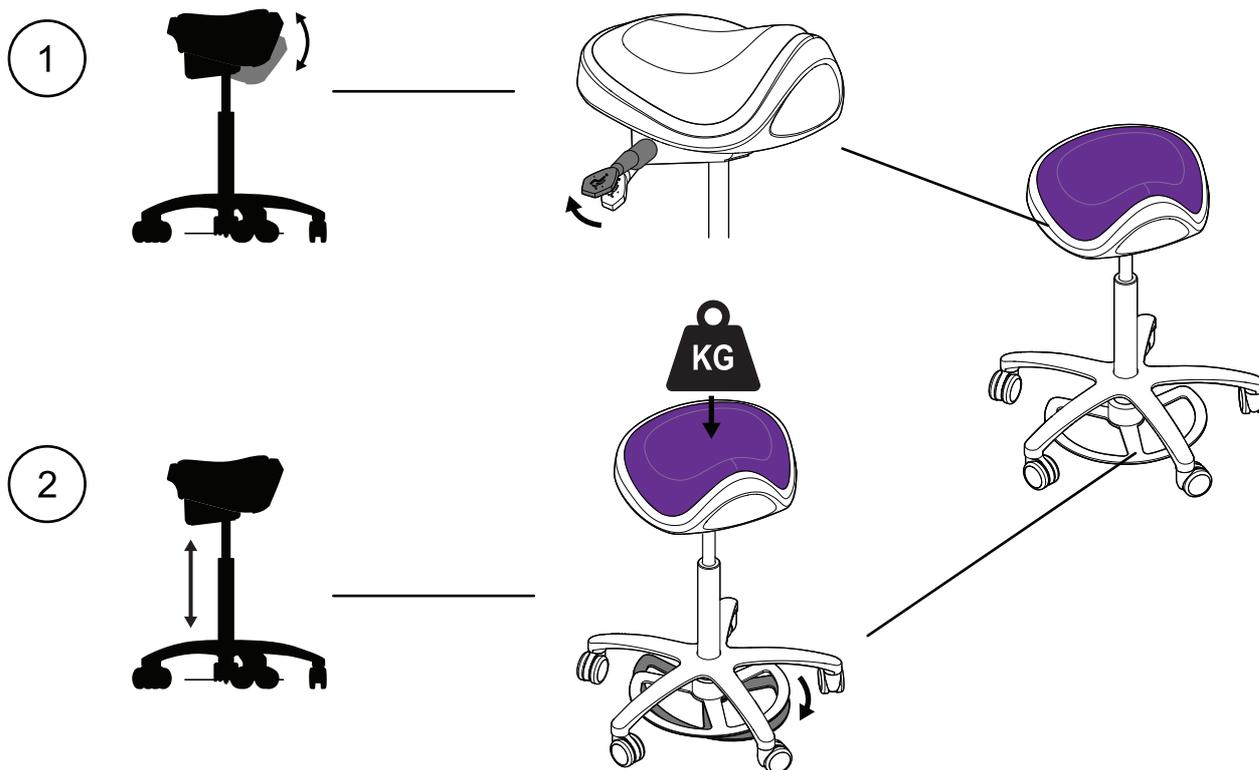


1. Угол наклона сиденья	Потяните рычаг вверх и удерживайте его в таком положении, чтобы разблокировать сиденье и отрегулировать угол его наклона. Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать сиденье в нужном положении. Внимание! Будьте осторожны, наклоняя кресло вперед, чтобы не упасть с него.
2. Высота сиденья	Сидя в кресле, нажмите на кольцо и удерживайте его внизу. Отрегулируйте сиденье на необходимой высоте. Отпустите кольцо, чтобы зафиксировать кресло в нужном положении. Примечание. Для регулировки положения кольцо можно вращать (не нажимая на него).



Изделие является медицинским устройством в соответствии с (EU) 2017/745

О серьезных инцидентах, связанных с устройством, должен быть уведомлен его изготовитель и местный компетентный орган.

## Габаритные размеры

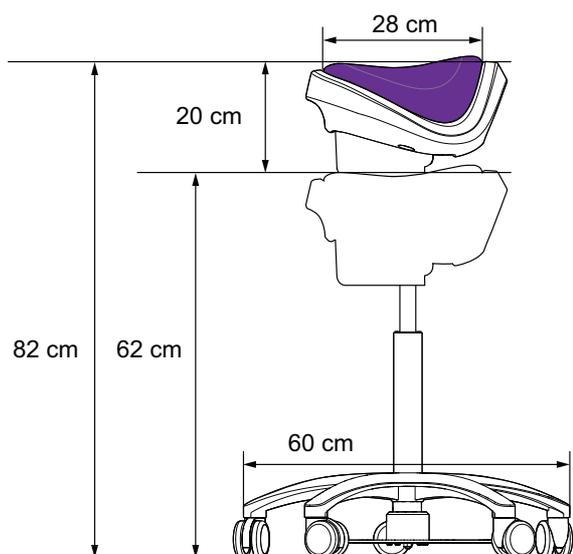

Самое низкое положение сиденья	62 см (от пола до верхнего края стула)
Самое высокое положение сиденья	82 см (от пола до верхнего края стула)
Диапазон регулировки высоты сиденья	20 см
Глубина посадки	28 см
Ширина сиденья	35 см
Наклон сиденья	От -4° до 10°
Масса	10 кг
Свободно вращающиеся колесики	∅ 6,5 см
Основание стула	∅ 60 см

## Чистка

Для удаления пятен и проливов с обивки можно использовать мыльный раствор. Дать обивке высохнуть.

Для дезинфекции обивки мы рекомендуем использовать средство Dürr FD 312 или аналогичное.

Периодически начисто протирайте все детали одобренным Planmeca дезинфицирующим средством для поверхностей (Dürr FD 333 / FD 322 или Orbis).

## Техническое обслуживание

По вопросам проведения технического обслуживания стоматологического стула обращайтесь к дилеру Planmeca в вашем регионе.

## Установка подушки сиденья

Разместите подушку сиденья и прикрепите ее к сиденью двумя винтами снизу, как показано на рисунке ниже.

